

ШТАТИВ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНЫХ ВЛИВАНИЙ «СТЕЛЛС»

Паспорт.

Настоящий паспорт объединен с руководством по эксплуатации и является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические данные штатива для длительных вливаний.

1. Назначение.

Штатив предназначен для удержания двух стеклянных сосудов или четырех пакетов до 500 мл. Возможно непрерывное вливание в движении при использовании отдельно держателя флаконов.

2. Технические данные

- 2.1. Габаритные размеры – Высота: max - 2м.; min - 1,2м. в сборе - 0,7м.
- 2.2. Масса, не более – 0,3 кг.
- 2.3. При закрученном стопорном винте штатив выдерживает груз, 2кг
- 2.4. Срок службы, не менее 5 лет

3. Комплектность

Штатив поставляется в собранном виде и состоит из элементов указанных в таблице

Наименование	Кол-во, шт.
Держатель флаконов	1
Кольцо малое	2
Кольцо большое	2
Направляющая	1
Основание	1

4. Подготовка к работе


- 4.1. Распаковать изделие, проверить комплектность, протереть сухой мягкой тканью
- 4.2. Раскрыть основание и зафиксировать стопорным винтом.
- 4.3. Установить держатель флаконов
- 4.4. Установить направляющую на необходимую высоту и зафиксировать её, поворотом направляющей по часовой стрелке.
- 4.5. Установить флаконы
- 4.6. В процессе работы, при необходимости, производить дезинфекцию поверхностей штатива тампоном, смоченным 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором монохлорамина. Тампоны должны быть отжаты. При затруднении в использовании смазать фиксирующую цапгу.

5. Транспортирование и хранение

- 5.1. Штатив транспортируется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на транспорте.
- 5.2. Штатив должен храниться в закрытом помещении при температуре от -50 до +40°C и относительной влажности 80%.
- 5.3. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

6. Свидетельство о приемке

Штатив изготовлен и принят в соответствии с требованиями действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

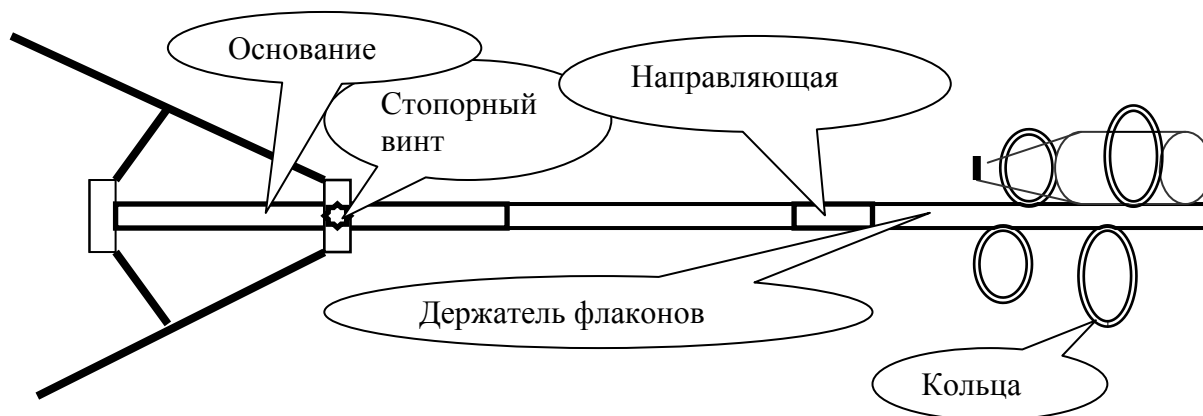

М.П.

Представитель ОТК

Дата выпуска

ООО «Медбаланс про», Санкт-Петербург, Костюшко, 19